

Gebrauchsanweisung

FFP2

BEDIENUNGSANWEISUNG:

1. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen und Einschränkungen kann die Wirksamkeit dieser Mundschutzmaske (Maske) erheblich beeinträchtigt werden und zu Krankheit, Verletzung oder sogar Tod führen.
2. Vor dem Einsatz am Arbeitsplatz muss der Träger vom Arbeitgeber in die richtige Verwendung des Atemschutzgeräts, gemäß den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsstandards, eingewiesen werden.
3. Diese Maske liefert keinen Sauerstoff. Verwenden Sie sie in ausreichend belüfteten Umgebungen, in denen genug Sauerstoff vorhanden ist.
4. Entsorgen Sie das Atemschutzgerät und ersetzen Sie es durch ein Neues, wenn:
 - a) die Maske übermäßig verstopft ist, denn dies kann zu Atembeschwerden führen,
 - b) die Maske beschädigt ist.
5. Verlassen Sie den kontaminierten Bereich, wenn Schwindel, Reizungen oder andere Belastungen auftreten.

BEACHTUNG:

1. Verwenden Sie unter folgenden Umständen keine Atemschutzmaske und betreten oder bleiben Sie nicht in einem kontaminierten Bereich:
 - a) wenn die Umgebung weniger als 19,5% Sauerstoff enthält,
 - b) wenn Sie Verunreinigungen riechen oder schmecken,
 - c) zum Schutz vor Gasen oder Dämpfen,
 - d) wenn Kontaminationen oder deren Konzentrationen unbekannt oder unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind,
 - e) zum Sandstrahlen, Sprühen und bei der Behandlung/Bearbeitung von Asbest,
 - f) in explosionsgefährdeten Bereichen.
2. Ändern oder missbrauchen Sie die Maske nicht!
3. Verwenden Sie die Maske nicht mit vielen Gesichtshaaren oder anderen Bedingungen, die eine gute Gesichtsversiegelung verhindern könnten. Die Anforderungen an die Leckage werden erfüllt.

4. Die Maske muss vor jedem Gebrauch überprüft werden, um sicherzustellen, dass sich in der Atemzone keine Schäden wie bspw. durch Löcher oder Einstiche vorhanden sind.
Zerrissenes Filtermaterial um Klammerpunktionen herum gilt als Beschädigung.
5. Dieses Atemschutzgerät schützt vor bestimmten Partikelkontaminanten, verhindert jedoch nicht, dass das Risiko einer Krankheit oder Infektion besteht. Missbrauch kann zu Krankheit oder Tod führen.
6. Diese mit „NR“ gekennzeichnete Maske darf nicht länger als eine Schicht verwendet werden.
7. Diese Maske ist nicht für Ohr-geschädigte Benutzer geeignet.

ANPASSUNGSANWEISUNG:

1. Legen Sie die Finger in die Mundschutzmaske und biegen Sie den Nasenclip um die Finger, um eine Nasenform zu erhalten.
2. Halten Sie die Maske über Nase und Mund und ziehen Sie die Halteschlaufen hinter die Ohren.
3. Verwenden Sie beide Hände, formen Sie den Nasenclip um die Nase und verschieben Sie die Halteschlaufen um die Gesichtsversiegelung sicherzustellen.

4. Dichtungsprüfung

- a) Um den Sitz der Maske zu testen, geben Sie beide Hände über die Maske und atmen Sie stark ein.
 - b) Wenn im Nasenbereich ein Luftstrom zu spüren ist, stellen Sie den Nasenclip neu ein und verändern Sie den Sitz der Maske entsprechend.
 - c) Wenn an den Rändern der Maske Strömungen zu spüren sind, verändern Sie den Sitz der Maske solange, bis diese nicht mehr vorhanden sind.
5. Wechseln Sie die Maske sofort, wenn das Atmen schwierig oder die Maske beschädigt wird.
 6. Wechseln Sie die Maske, wenn keine ordnungsgemäße Gesichtsversiegelung erreicht werden kann.
 7. Die Einhaltung dieser Anweisung ist ein wichtiger Schritt bei der sicheren Verwendung dieser Atemschutzmaske.

Anpassung FFP2-Maske



Lagerungsbedingungen FFP2-Maske

